






1. Objektträger schräg (ca. 30 Grad-Winkel) in leerer Küvette lagern

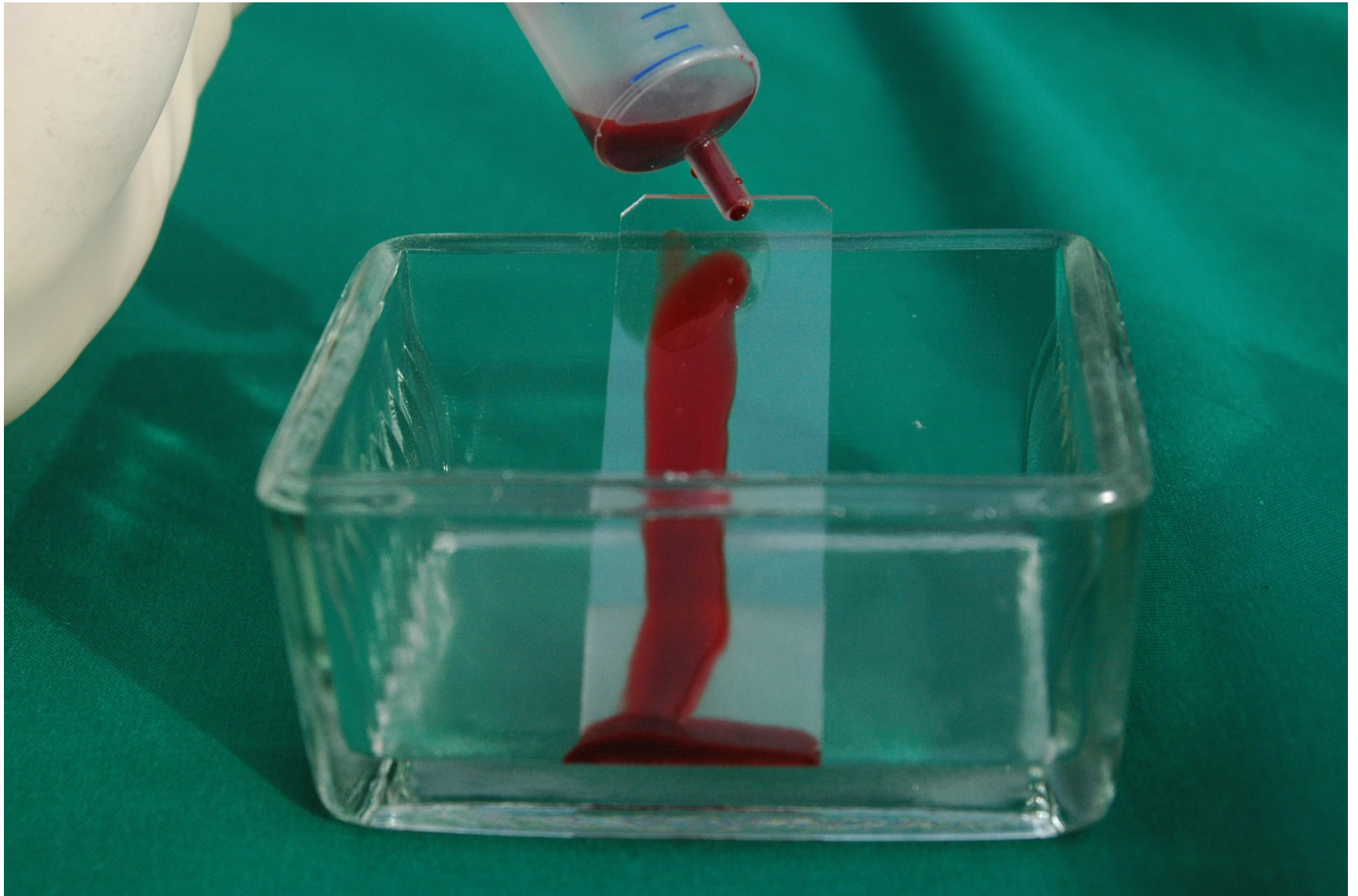


2. Knochenmarkblut langsam tropfenweise auf den Objekträger geben. Die Markbröckel bleiben am Glas haften.

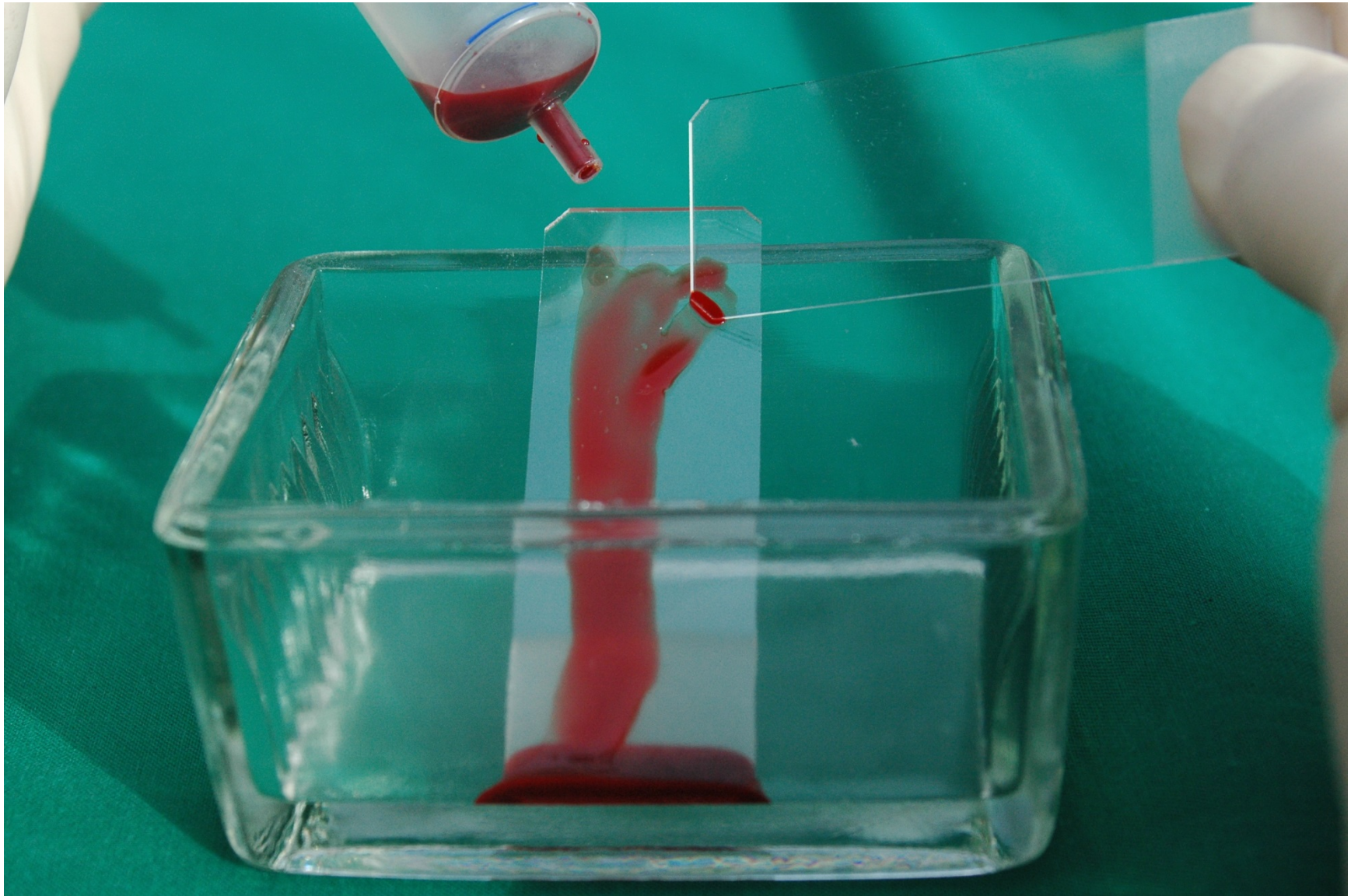


3. Die Markbröckel in der linken Ecke des Objektträgers mit zweitem Objektträger sammeln

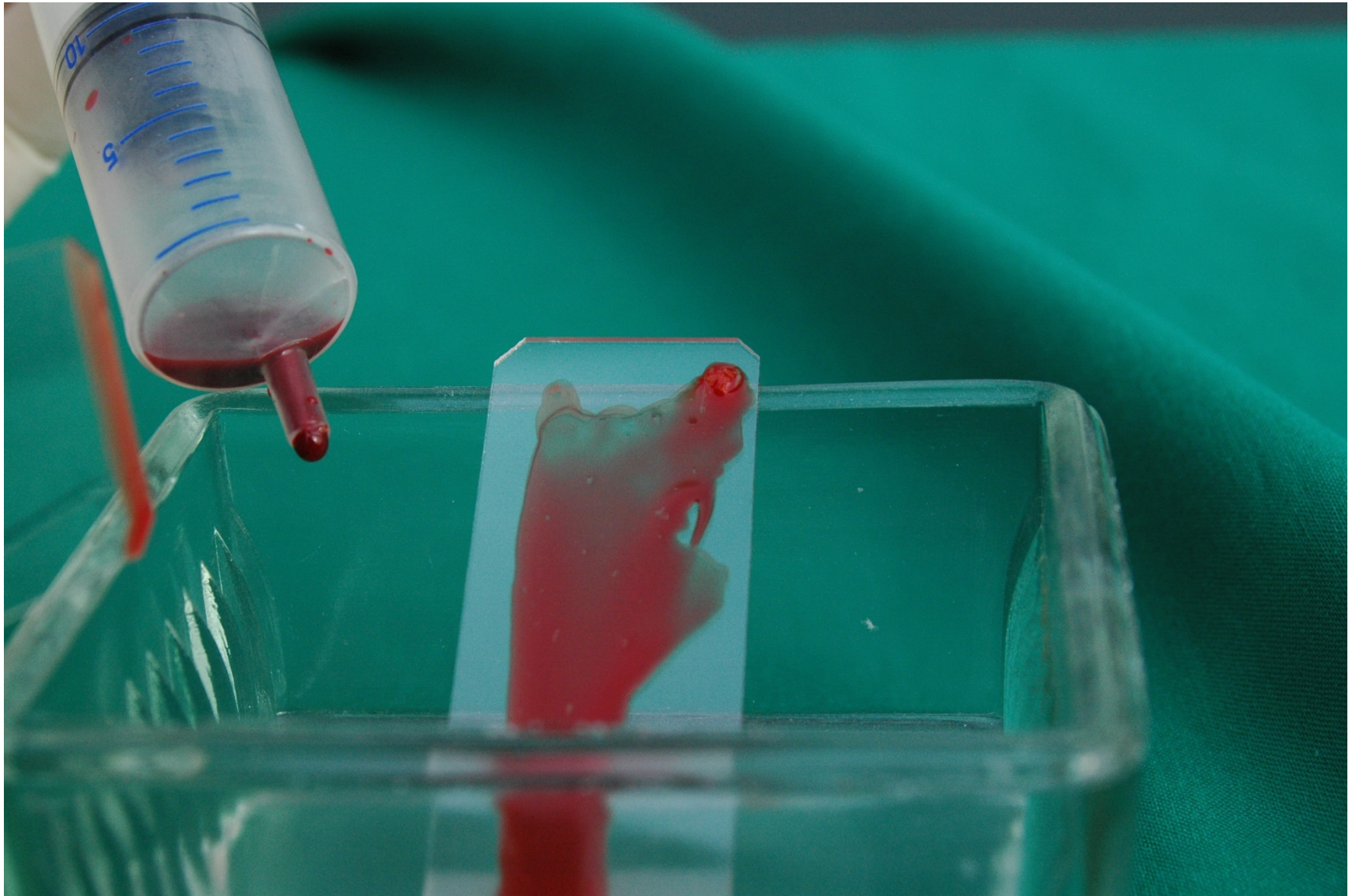


4. Gesammelte Markbröckel

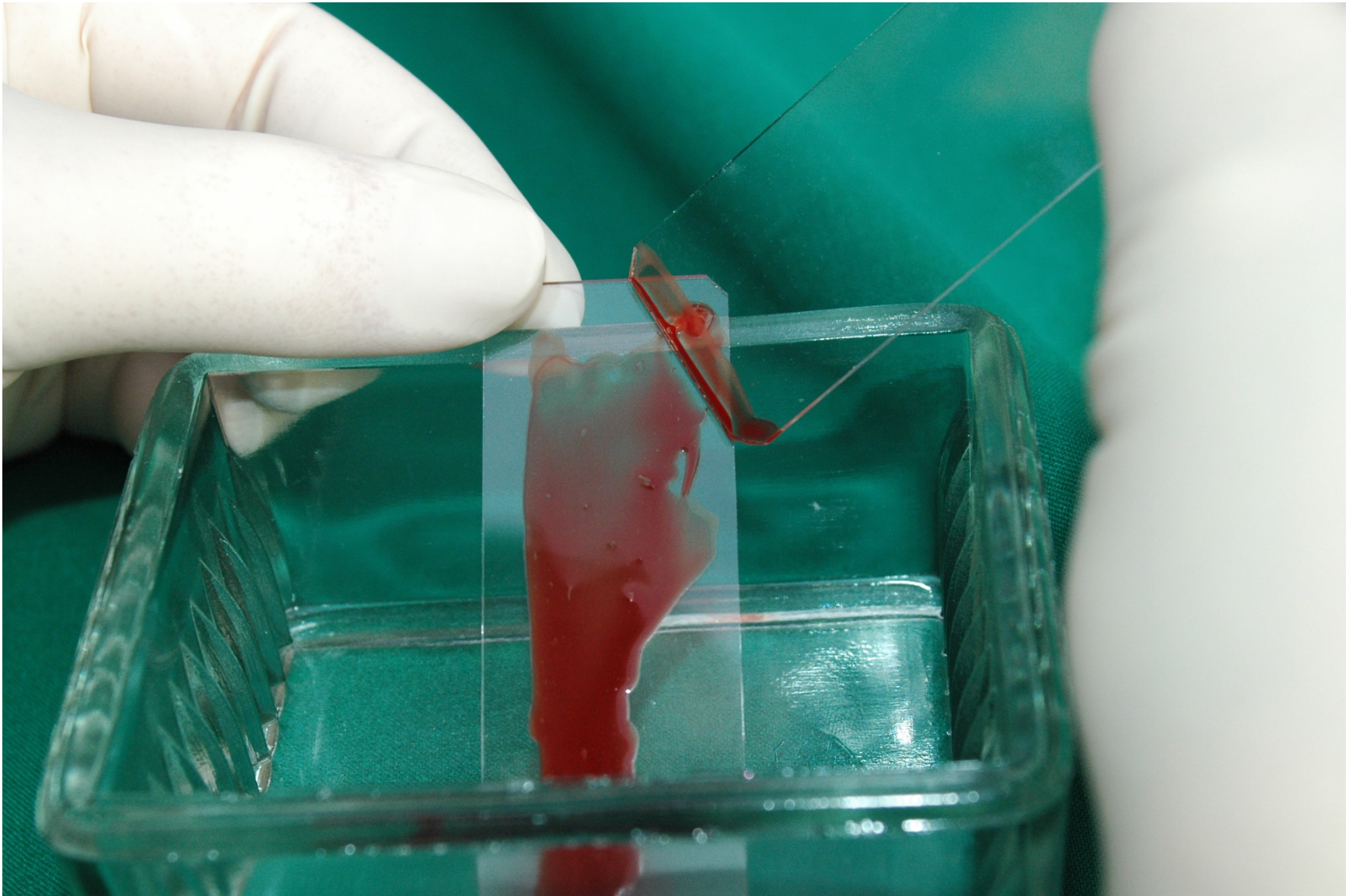


5. Markbröckel mit dem zweiten Objektträger aufnehmen

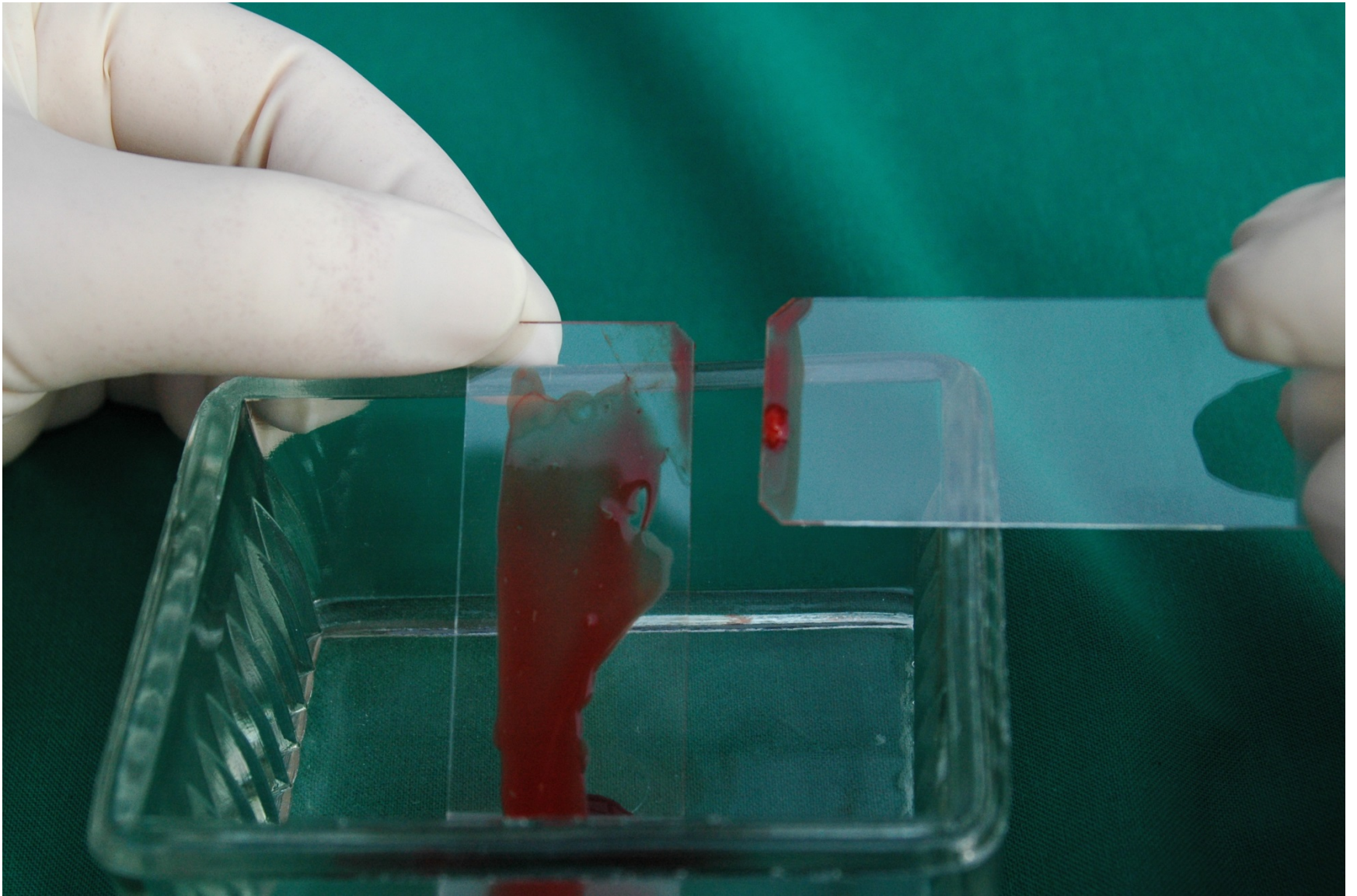

6. Aufgenommene Markbröckel auf zweitem Objektträger

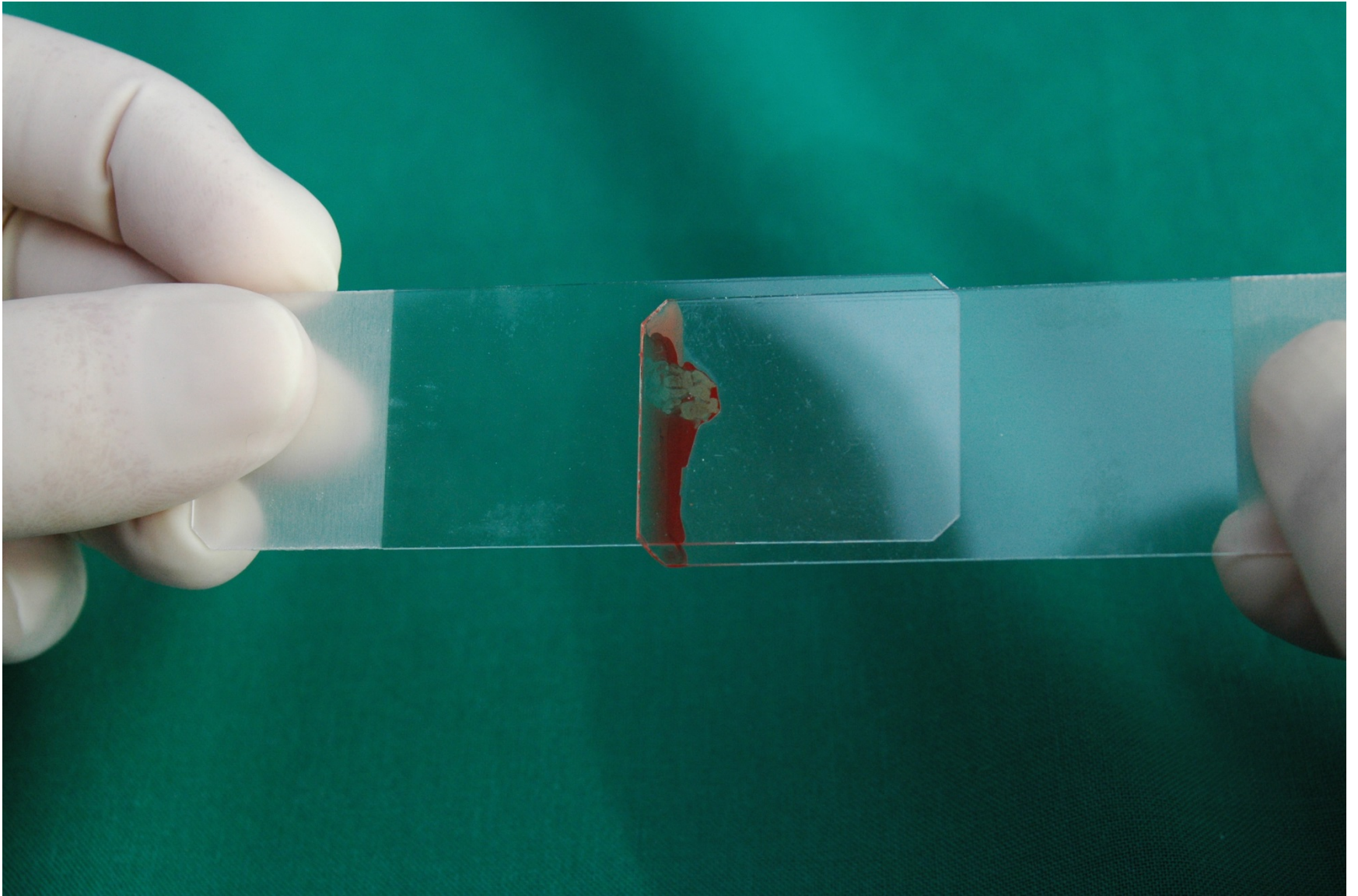

7. Markbröckel auf drittem Objektträger **leicht** quetschen

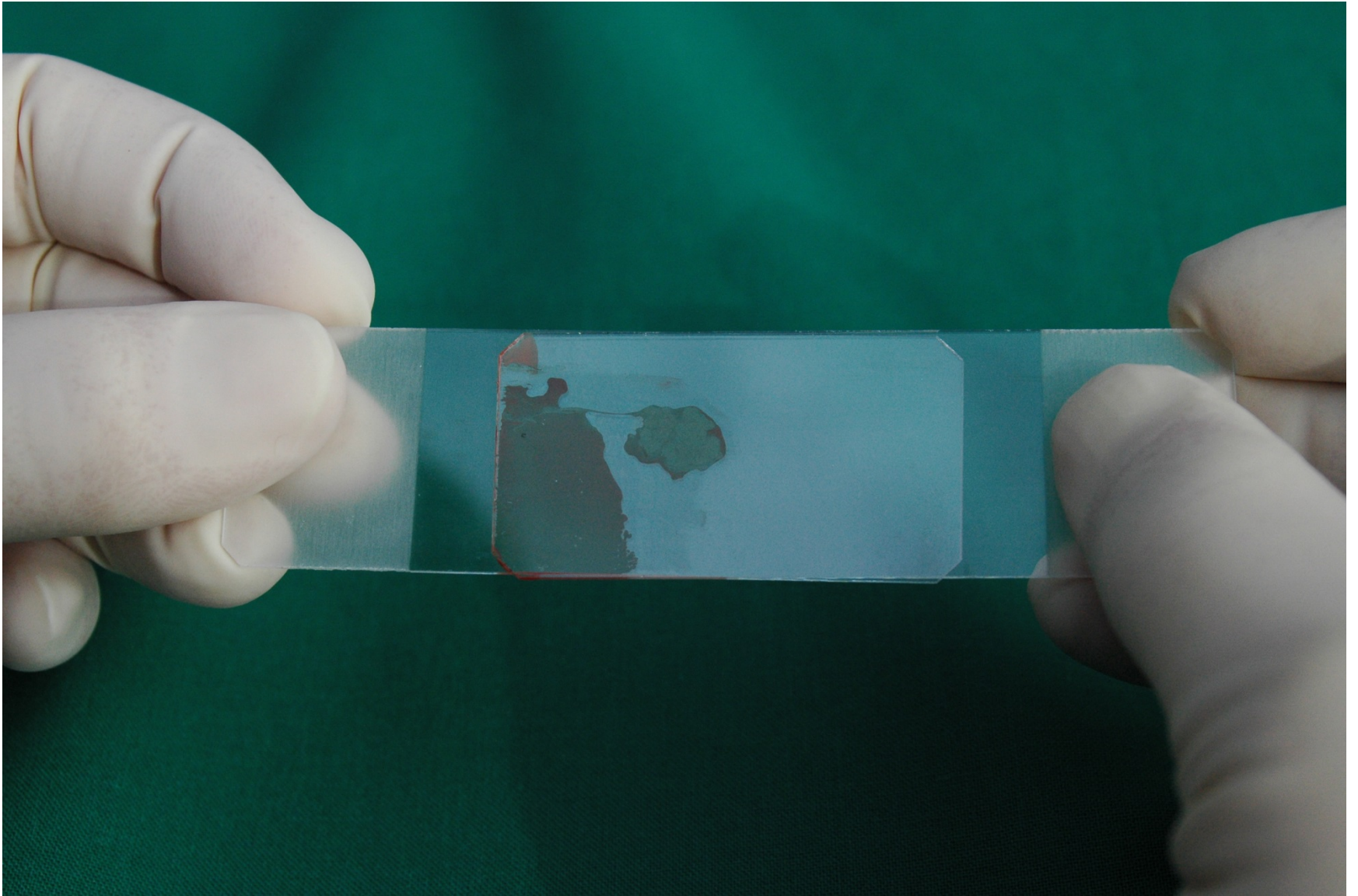

8. Markbröckel ausstreichen (zunächst nach links schieben)



9. Markbröckel ausstreichen (nach rechts ziehen)



10. Austrichpräparat lufttrocknen